

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

SVP 2-2 Kasutusjuhend

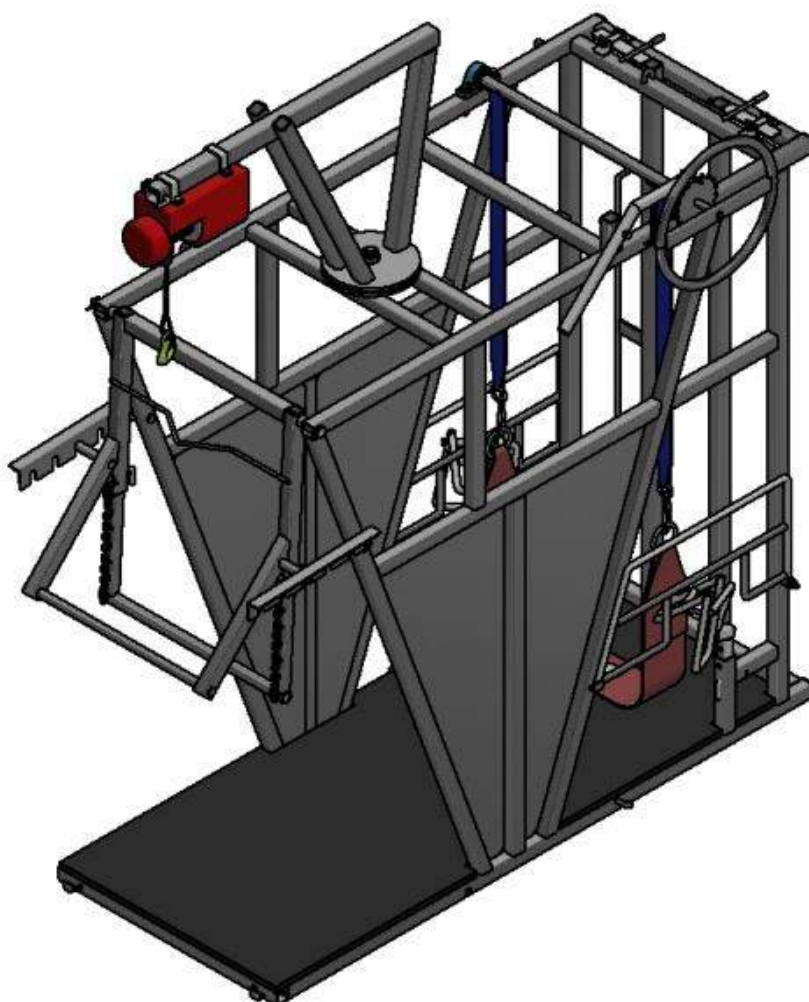

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

SISUKORD

Tutvustus.....	3
Hoolduspuki paigaldus ja tööks ettevalmistamine	4
Hoolduspuki kasutamine.....	7
Looma fikseerimine.....	7
Esijala tõstmine.....	7
Tagajala tõstmine	9
Looma vabastamine	9
Hoolduspuki kooslus	10
Hoolduspuki hooldamine.....	11
Hoolduspuki piirangud ja utiliseerimine	11
Hoolduspuki lisakomponentide kasutus.....	12
Hoolduspuki rattakomplekt.....	12
Lisa tõsterihma komplekt.....	14
Varuosade nimekiri.....	15
Hoolduspäevik.....	17

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

TUTVUSTUS


Latter NT OÜ (edaspidi Latter) poolt valmistatud sõrahoolduspukk on mõeldud kasutamiseks väiksemates farmides sõrahoolduse ja värkimistööde teostamiseks, 5-8 loomale päevas. Meie hoolduspukid on toodetud kvaliteetselt vastavalt masinaehitus direktiivile 2006/42/EÜ ja masina ohutus standarditele EVS-EN ISO 12100:2010 ja EVS-EN 349:1998+A1:2008. See algupärane kasutusjuhend sisaldab olulist teavaet masina hoolduseks ja kasutamiseks.

- Kõik masina kasutajad peavad olema tutvunud käesoleva juhendiga.
- Lisaks tuleb tutvuda ka elektrivintsi juhendiga.
- Kõik isikud, kes vastutavad masina paigalduse ja hoolduse eest, peavad olema tutvunud käesoleva juhendiga.
- Kasutaja on vastutav selle juhendi valesti tõlgendamisel tekkinud kahjude eest. Küsimuste korral pöörduge toote valmistaja või edasimüüja poole.
- Hoidke juhendit masina paigalduskoha lähedal kasutajatele kättesaadavas kohas.
- Pidage päevikut masina hooldustööde ja esinevate vigade kohta. Päevik leitav lisas.
- Masinale tehtavad muudatused on lubatud ainult tarnija kirjalikul loal.
- Võtke ühendust tarnijaga hooldustööde korral, mis ei ole kirjeldatud selles juhendis.
- Masina pikaajalise ja ohutuse tagab õigeaegselt läbi viidud hooldus ja korrektne kasutamine.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

HOOLDUSPUKI PAIGALDUS JA TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

Paigaldage hoolduspukk tasasele ja siledale põrandale. Seadme kasutamiseks vajalik ruum on mõõtmatega 4,1x2,9 x2,6 m (joonis 1). Esijala kinnituste kasutusele võtuks on vaja vahetada nende kohad omavahel ja paigaldada nad sobivale kõrgusele tööasendisse (foto 1). Esmasel saabumisel on nad asetatud transpordiasendisse (foto 2). Eemaldage elektrivintsi trossi trumlilt kilepakend ja ühendage vints vooluvõrku vastavalt vintsiiga kaasas olevale juhendile. Pikendusjuhtme kinnitamine vastavalt fotole 3. Paigaldage turvalaienduse komplekt vastavalt joonistele 2 ja 3.

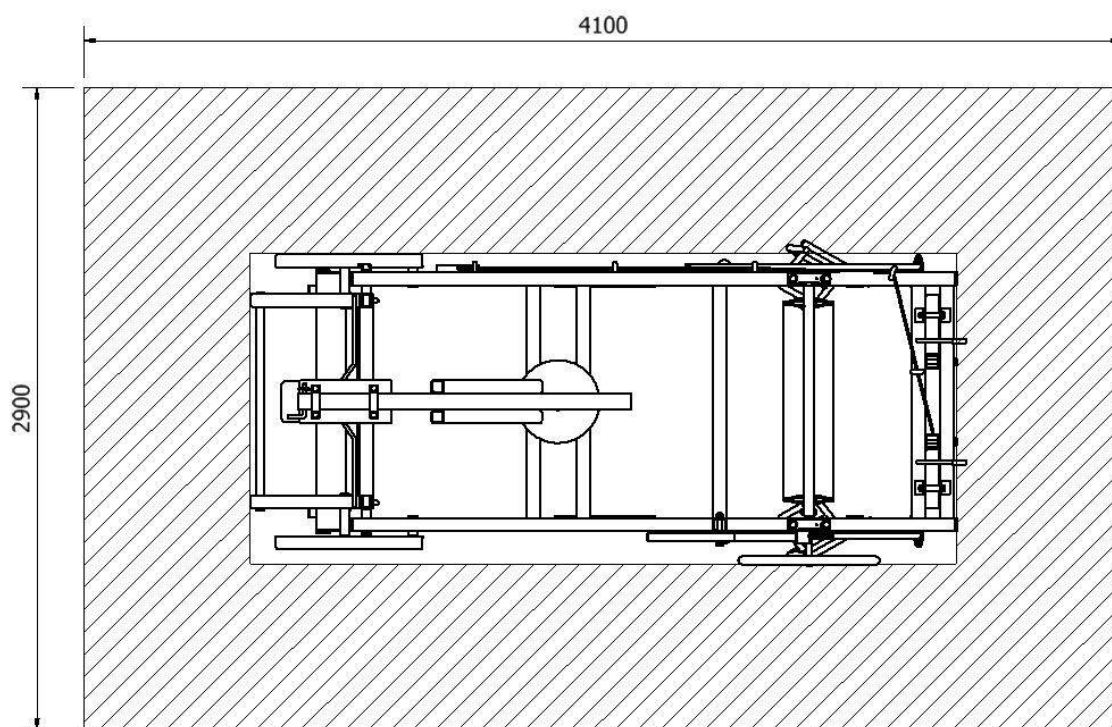

Joonis 1.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend



Foto 1.

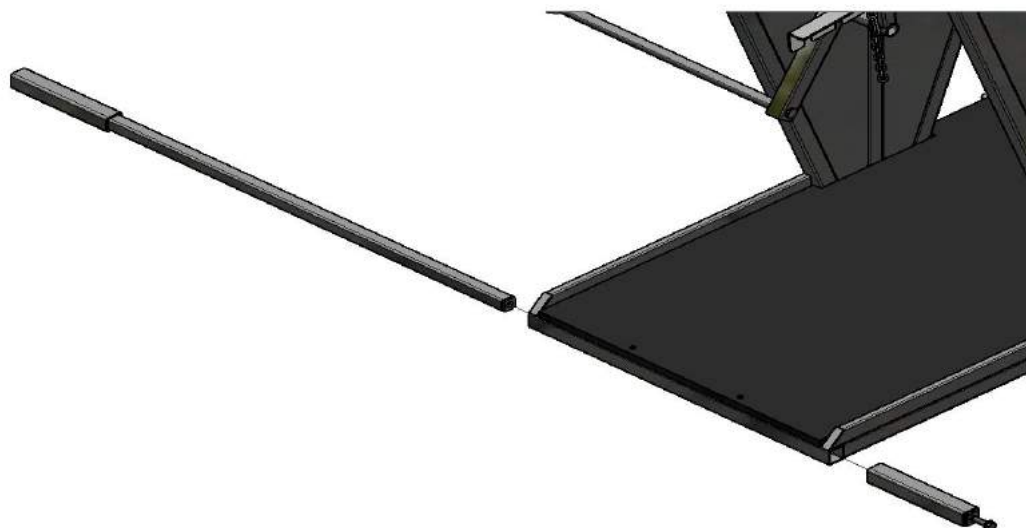


Foto 2.



Foto 3.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend



Joonis 2



Joonis 3.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

HOOLDUSPUKI KASUTAMINE

LOOMA FIKSEERIMINE

Ava pealukustus toru ja tõsta vintsi abil üles tagaraam (foto 4.) Peale looma sisse ajamist sulge, käepidemest tõmmates, pealukustus toru. Lase vintsi tagaraam alla ja sule kammsulguritega. Reguleeri tagaraami liugraam sobilikule kõrgusele ja fikseeri stoppersõrmedega. Ühenda tõsterihm esijalgade tagant käsivintsi konksudesse ja toesta loom, käsivintsi rattast keerates, piisava tugevusega (foto 5).



Foto 4.



Foto 5.

ESIJALA TÕSTMINE

Keera vintsi nool esijala kinnituse kohale ja lase tõstenöör esijala kinnituse haarade vahelt läbi (foto 6). Kinnita tõsterihm ümber looma jala ja ühenda nööri otsas oleva turvaklambriga. Tõsta looma jalga vintsi abil jalakinnituse haarade vahele piisava fikseeritud asendi saavutamiseni (foto 7). Turvaklambriga on vajadusel võimalik jalga kiiresti vabastada (foto 8).

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend



Foto 6.



Foto 7.



Foto 8.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

TAGAJALA TÕSTMINE

Keera elektrivintsi nool tagaraami kohale ja lase tõstenöör alla. Kinnita rihm, põlve alt, ümber looma tagajala ja ühenda turvaklambriga. Tõsta vintsi abil looma jalgu üles ja käega abistades juhi jalga sobivasse asendisse, et jalga oleks kindlalt mõlema horisontaaltoru vastu fikseeritud (foto 9).




Foto 9.

LOOMA VABASTAMINE

Tõsta vintsi abil üles tagaraam ja ava pealukustus toru lukustusklamber. Aja loom tagurpidi tagasi hooldepuukist välja.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

HOOLDUSPUKI KOOSLUS

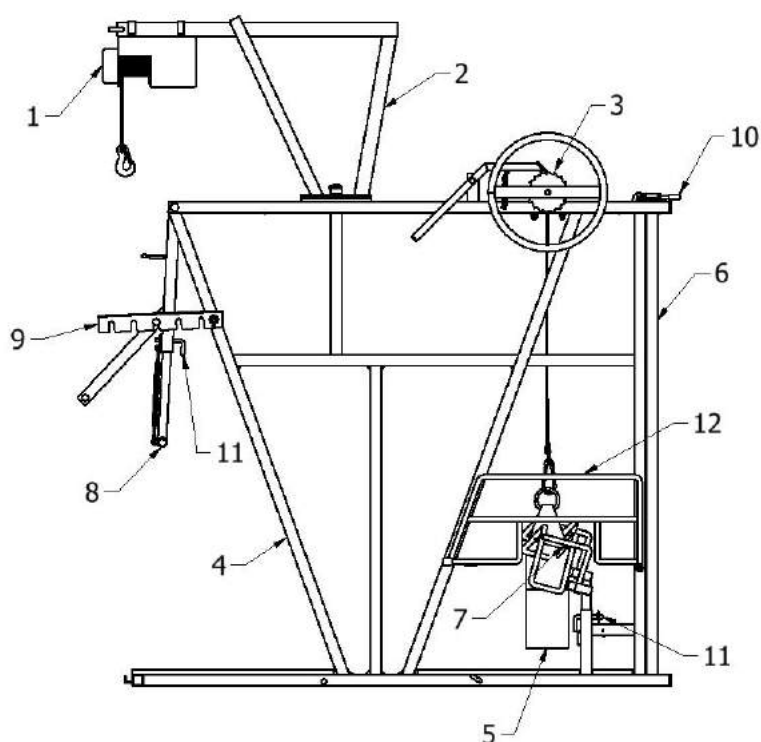

Joonis 4.

1. Elektrivints, 2. Vintsi nool, 3. Käsivints, 4. Puki raam, 5. Looma tõsterihm, 6. Pealukustus toru, 7. Esijala tugi, 8. Tagaraam. 9. Kammsulgur, 10. Lukustusklamber, 11. Stoppersõrm, 12. Turvakaitse.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

HOOLDUSPUKI HOOLDAMINE

1. Elektrivintsi hooldus teostada vastavalt vintsi kasutusjuhendile.
2. Käsivintsi laagrite ja vintsi noole liugseibi määrimine iga 6 kuu järel, vajadusel tihemini. Vintsi noole liugseibi ja käsivintsi laagrite määrimiseks kasutada määrdenipleid (fotod 10, 11).
3. Tõsterihmadele teostada pidevalt visuaalsest jälgimist, et ei esineks mehhaanilisi vigastusi. Rihmad puhastada peale tööde lõppu.
4. Pealukustus toru juhtnööri teostada pidevat visuaalset jälgimist, et ei esineks mehhaanilisi vigastusi.
5. Hoolduspuki pööranda kummikate pesta peale tööde lõppu.
6. Hoolduspuki liikuvate osade visuaalne kontrollimine teostada jooksvalt peale tööde lõppu. Kontrollida kinnitusedetailide kompleksust, et vältida vigastusohtu.
7. Varuosade tellimiseks ja garantiiremondiks pöörduda tarnija poole



Foto 10.



Foto 11.

HOOLDUSPUKI PIIRANGUD JA UTILISEERIMINE


1. Latter NT OÜ (edaspidi Latter) poolt valmistatud sõrahoolduspukk on mõeldud kasutamiseks väiksemates farmides sõrahoolduse ja värkimistöde teostamiseks loomadele kuni 900 kg.
2. Elektrivintsi ei tohi kasutada muuks otstarbeks ja maksimaalne tõstekoormus on 300 kg.
3. Hoolduspukki ei tohi kasutada niiskes keskkonnas.
4. Töö lõppedes masin puhastatakse ja kontrollitakse visuaalselt seadme korrasolekut.
5. Kontrollitakse elektrivintsi tõstetrossi, vastavalt vintsi juhendile.
6. Masina metallosad saab utiliseerida koos vanametalliga, erandiks on elektrimootor mis tuleb utiliseerida tootja ettekirjutuste kohaselt.

Sõrahoolduspuuki SVP 2-2 kasutusjuhend

HOOLDUSPUKI LISAKOMPONENTIDE KASUTUS


HOOLDUSPUKI RATTAKOMPLEKT

Rattakomplekti paigalduseks tuleb tõsta tagaraam vintsiga ülemisse asendisse. Eemalda elektri pikendusjuhe. Paigalda rattakäru joonisel 5 näidatud viisil. Käru käepidet allapoole surudes tõsta hooldepukk üles ja sulge külgtoed (C) joonis 6. Vigastuste vältimiseks kasutada töökindaid ja turvajalatseid.

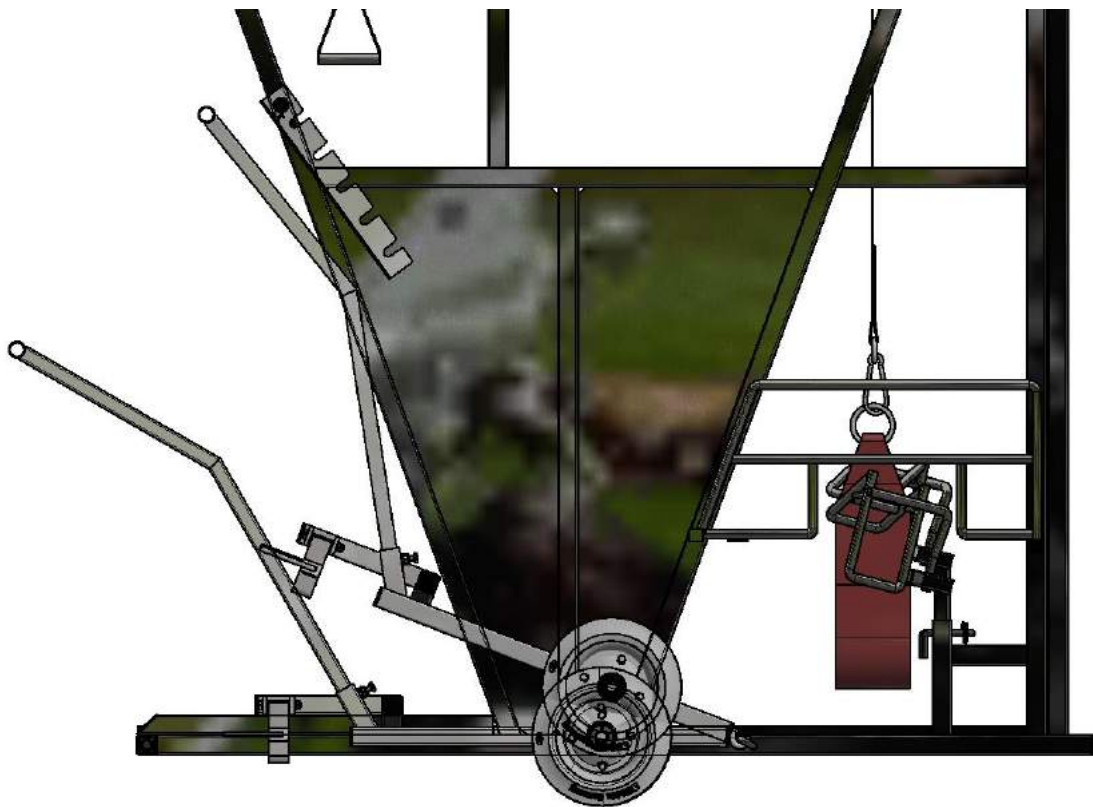

Joonis 5.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

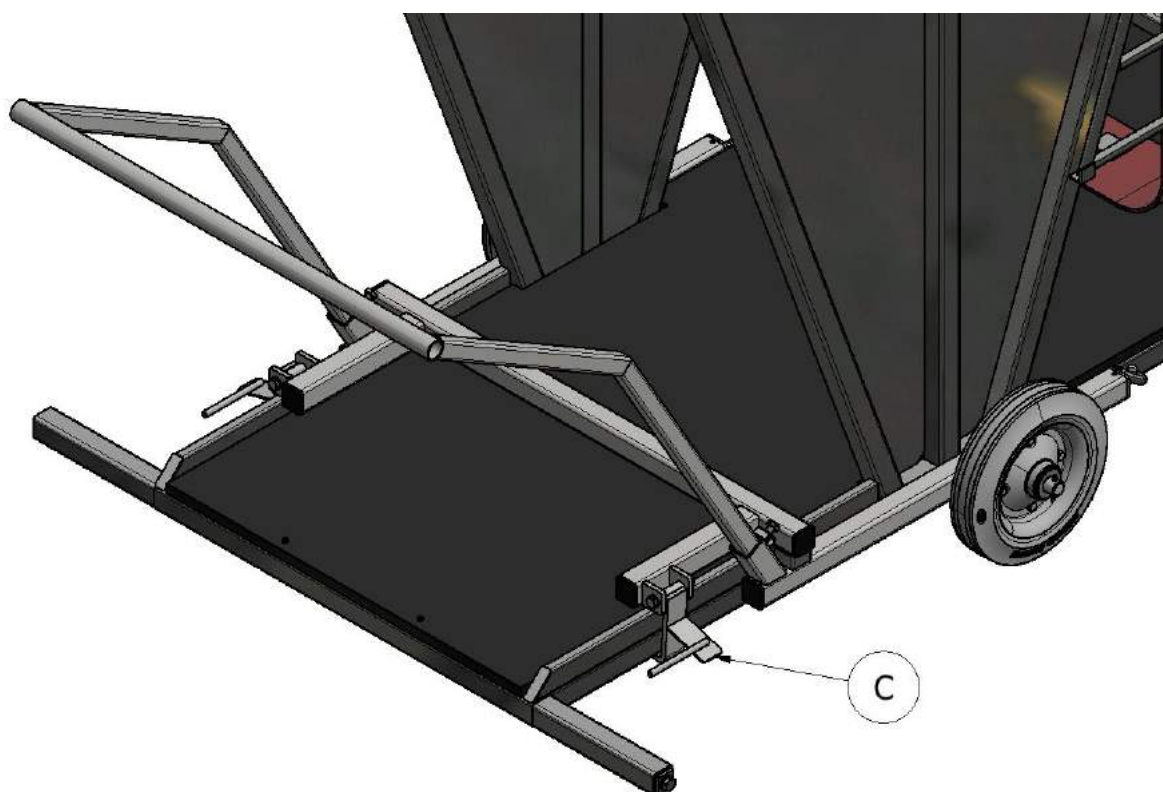


Joonis 6.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

LISA TÕSTERIHMA KOMPLEKT


Hoolduspukile on võimalik paigaldada tagumine tõsterihma komplekt lisaks (joonis 7).

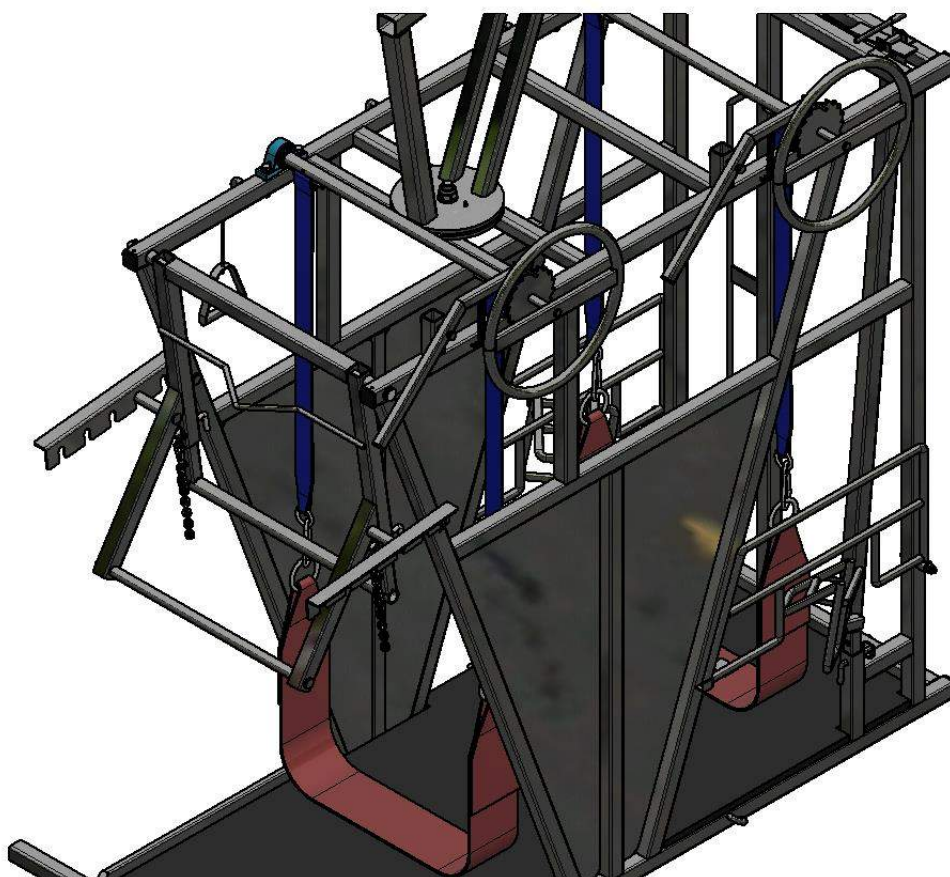

Joonis 7.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

VARUOSADE NIMEKIRI

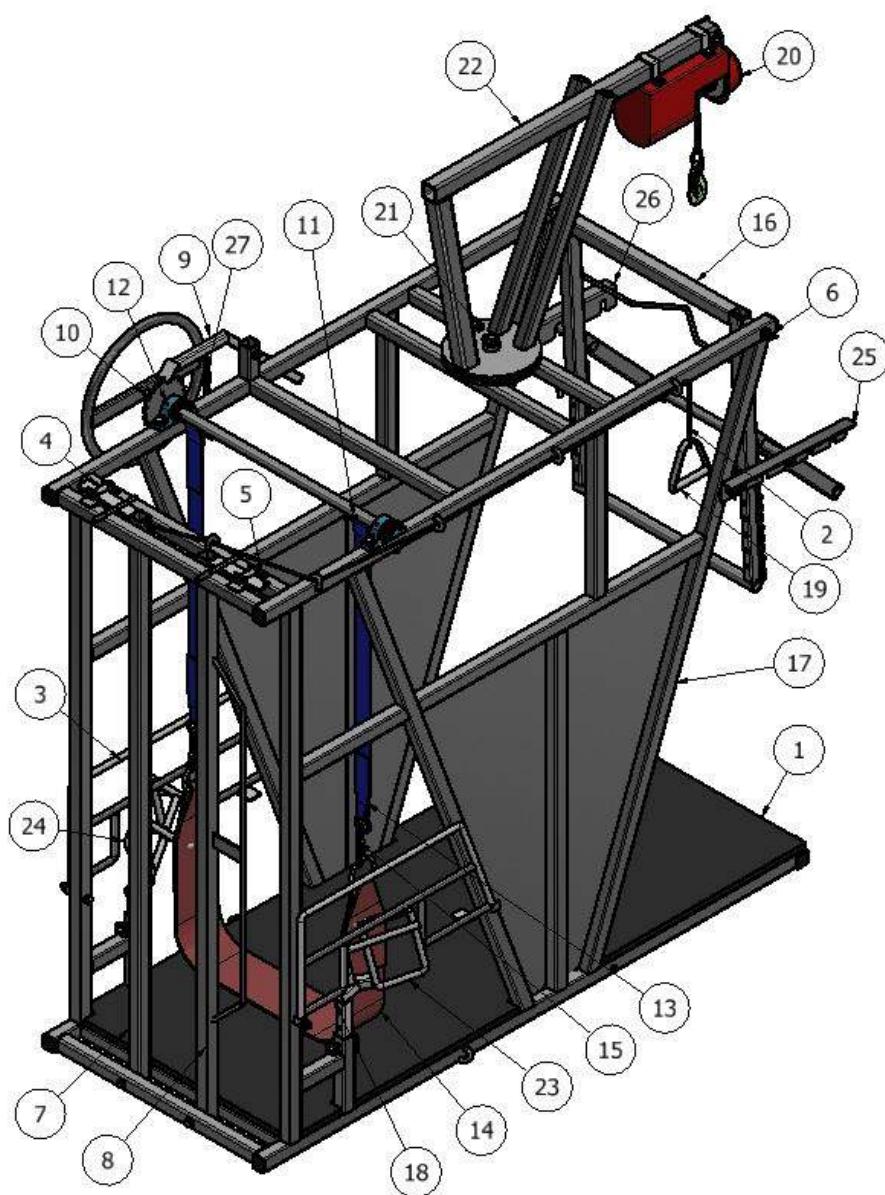

Joonis 8.

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

Nr.	Artikkel	Nimetus
1	D000233_021	Põhjakate SVP-2
2	D000556_010	Nöör punutud 6 mm
3	K000069_080	Vasak küljekaitse
4	K000071_080	Vasak lukusti
5	K000072_080	Parem lukusti
6	K000093_080	Sõrm 810
7	K000094_080	Vasak lukustitoru
8	K000102_080	Parem lukustitoru
9	K000106_080	Käepide
10	K000105_070	Rool KZ
11	K000107_070	Rihma võll KZ
12	LUCP204K	Laagrisõlm 20 mm püstine
13	Linttropp 1000	L= 1,0 m + Rõngad
14	Linttropp 150x1500	L= 1,5 m + Rõngad
15	V1647	Karabiin 8 x 80 mm
16	K000126_080	Tagaraam
17	K000131_080	Puki raam
18	K000133_080	Parem küljekaitse
19	K000166_070	Nööri käepide KZ
20	AWD 153	Elektritali 200/400 kg
21	D000308_000	Liugseib
22	K000190_070	Kraana nool KZ
23	K000194_090	Parem esijala kinnitus
24	K000196_090	Vasak esijala kinnitus
25	K000210_080	Parem kammsulgur
26	K000211_080	Vasak kammsulgur
27	VJ901415	Tõmbevedru 90 x14 x1,5



H00LDUSPÄEVIK

[illegible]



Animal Farming Equipment

Sõrahoolduspuki SVP 2-2 kasutusjuhend

Valmistaja:

Latter NT OÜ

Pikk 37b, Ambla alevik

73502 Järvamaa

Estonia

Telefon: +372 3851852

E-post: info@latter.ee

Koduleht: www.latter.ee

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma Latter NT OÜ eelneva kirjaliku loata keelatud. Latter NT OÜ töösuunaks on pidev arendustöö. Latter NT OÜ jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Dokumendi number:53

Latter NT OÜ kinnitab ja kannab ainuisikuliselt vastutust selle eest, et allpool nimetatud toode on toodetud vastavalt meie ettevõtte standarditele ja on kooskõlas järgmise (järgmiste), direktiivi (-de), standardi (-te) või muude normatiivdokumentidega:

Masinaehitus direktiiv 2006/42/EÜ

Masina ohutus standardid:

EVS-EN ISO 12100:2010

EVS-EN 349:1998+A1:2008

Käesoleva deklaratsiooniga hõlmatud tootetüüp:

Sõrahoolduspukk SVP-2

Latter NT OÜ kvaliteedisüsteem on loodud järgides kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ISO 9001:2008 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001:2005.

Latter NT OÜ vastutab ainult käesoleva deklaratsiooni inglise, soome ja saksa keelsete versioonide õigsuse eest. Kui deklaratsioon on tõlgitud mõnesse teise keelde, vastutab tõlke õigsuse eest tõlkija.

Väljaandmise kuupäev:2016-09-19



Taavi Raba

Manager